



System Monitro Glwcos y Gwaed

Canllaw Cyfeirio Cyflym

Darllenwch eich Llawlyfr y Defnyddiwr i gael cyfarwyddiadau llawn cyn gwneud prawf glwcos y gwaed

IVD

CE 0197



Eich Mesurydd a Striped Profi Ino VivaChek™

Pen yr electrode:

Gosodwch y pen yma i mewn yn y twll i striedi profi ar y mesurydd gyda'r wyneb lliw ar i fyny

Pen y sampl:

Lle mae'r gwaed yn cael ei dynnu i mewn



Botwm y pŵer

Twll y striedi profi

Sgrin

Lle daw'r striedi allan

Botwm i fynd yn ôl


Botwm symud ymlaen

Twll data USB micro





Eich Dyfais Bigo VivaChek™

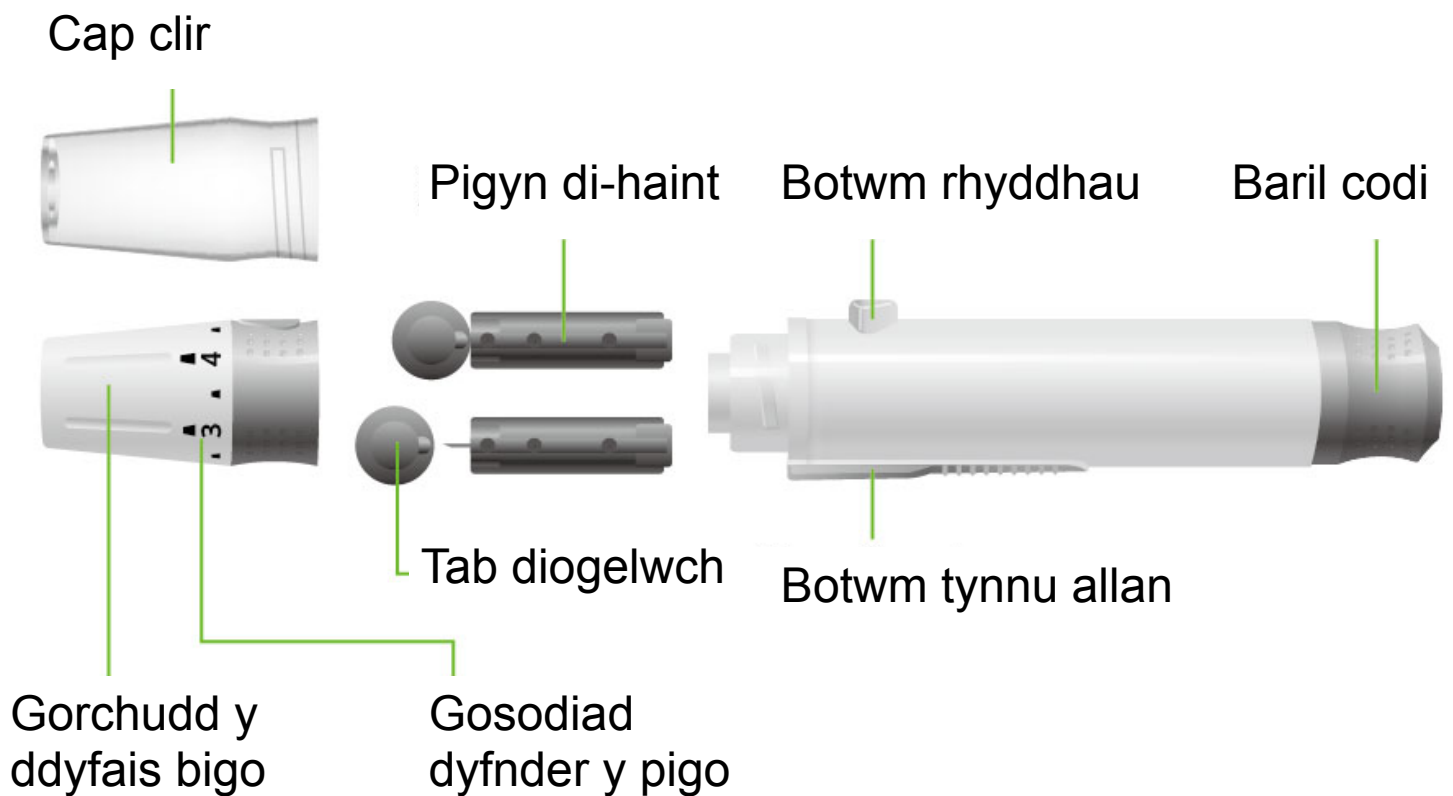





Paratoi'r Ddyfais Bigo


Pwysig:

Cyn gwneud y prawf, sychwch y croen lle byddwch yn gwneud y prawf gyda swab alcohol neu ddŵr a sebon. Defnyddiwch ddŵr cynnes i ddod â mwy o waed yno os oes raid. Yna sychwch eich dwylo a'r croen lle'r ydych am wneud y prawf yn drwyadl.


1. Dadsgrifiwch orchudd y ddyfais bigo o gorff y ddyfais bigo. Rhowch bigyn di-haint i mewn i'r ddyfais bigo.

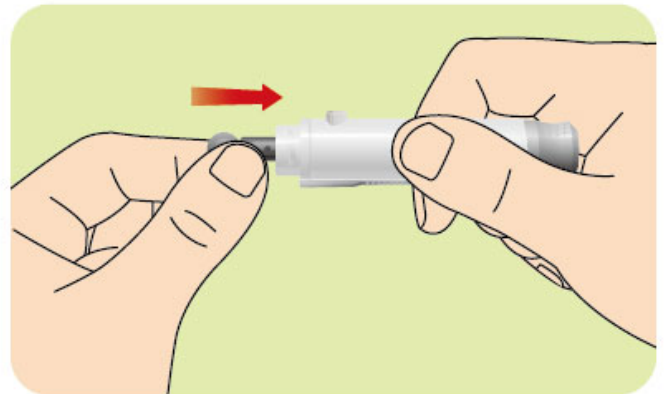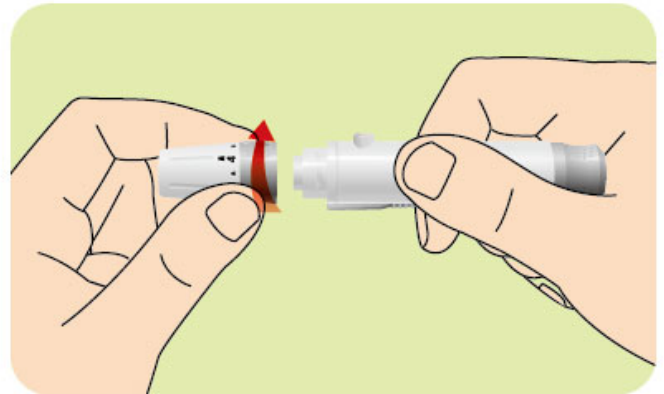



2. Daliwch y pigyn yn gadarn yn y ddyfais bigo a throi tab diogelwch y pigyn nes ei fod yn dod yn rhydd, yna tynnwch y tab diogelwch oddi ar y pigyn.

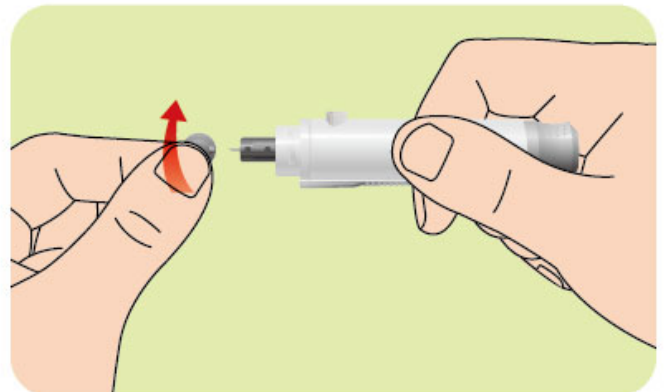


- 3.** Yn ofalus sgrïwiwch y gorchudd yn ôl ar y ddyfais bigo.

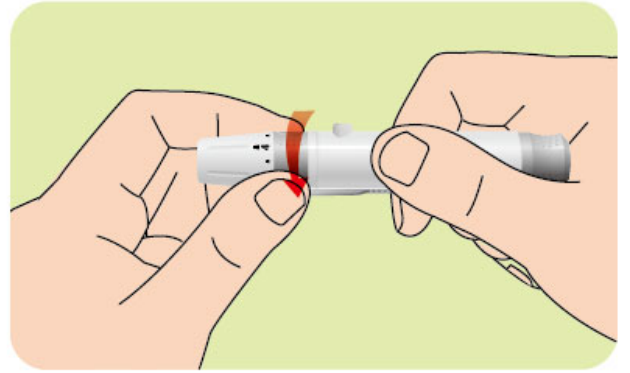

- 4.** Newidiwch ddyfnder y pigiad drwy droi gorchudd y ddyfais

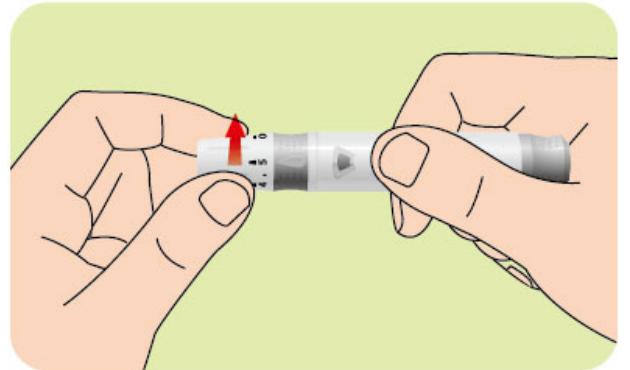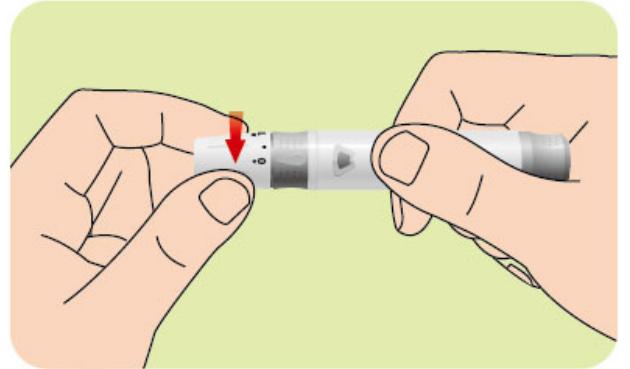


- 5.** Tynnwch y baril codi yn ôl i osod y ddyfais bigo.

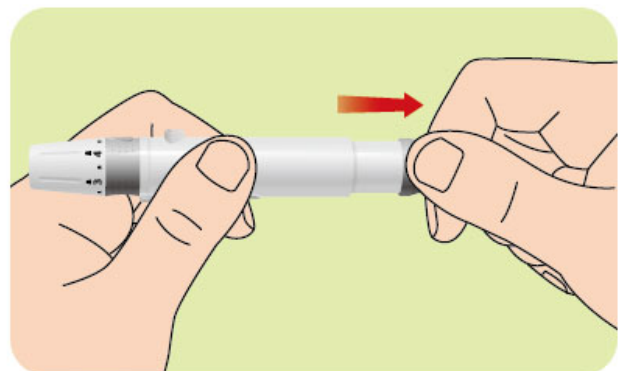



Gwneud Prawf Glwcos y Gwaed


1. Tynnwch sribed profi o'r cynhwysydd sribedi. Caewch gaead y cynhwysydd yn dynn yn syth ar ôl tynnu'r sribed profi.
2. Rhewch y sribed profi i mewn i'r mesurydd yng nghyfeiriad y saethau. Bydd y mesurydd yn dod ymlaen ar ei ben ei hun.

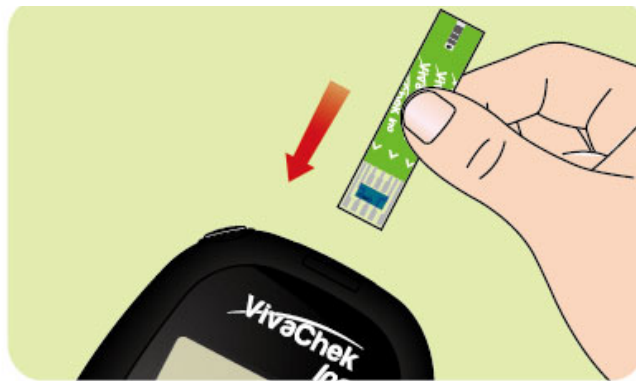



3. Bydd symbol gyda sribed profi a gwaed yn fflachio yn ymddangos i adael i chi wybod bod y mesurydd yn barod i wneud y prawf.



4. Gwasgwch y ddyfais bigo yn erbyn ochr y bys sydd i gael y pigiad gyda'r gorchudd yn gorwedd ar y bys. Gwthiwch y botwm rhyddhau i bigo pen eich bys.

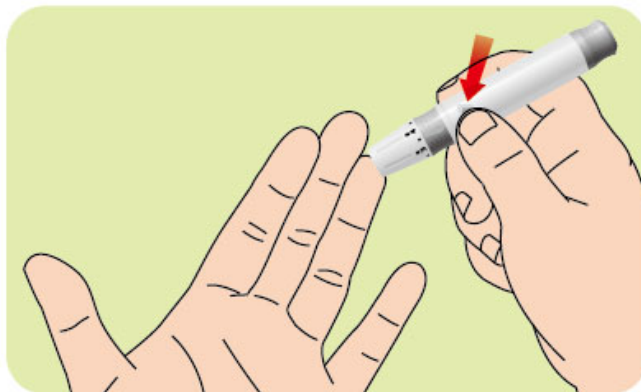

5. Ar unwaith, gosodwch ben y strided profi ar y diferyn o waed. Mae'r gwaed yn cael ei dynnu i mewn i'r strided profi drwy'r pen. Peidiwch â rhoi gwaed ar ben y strided profi.

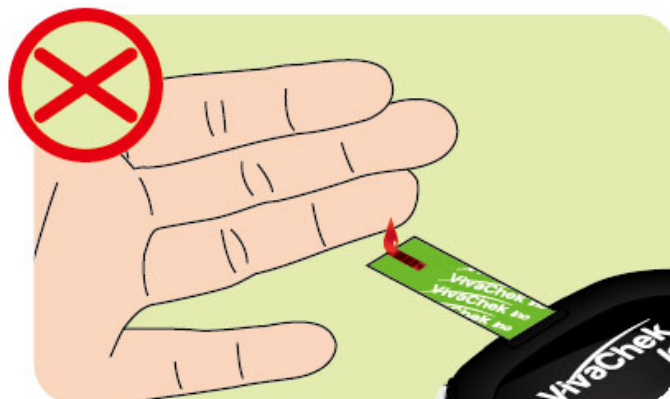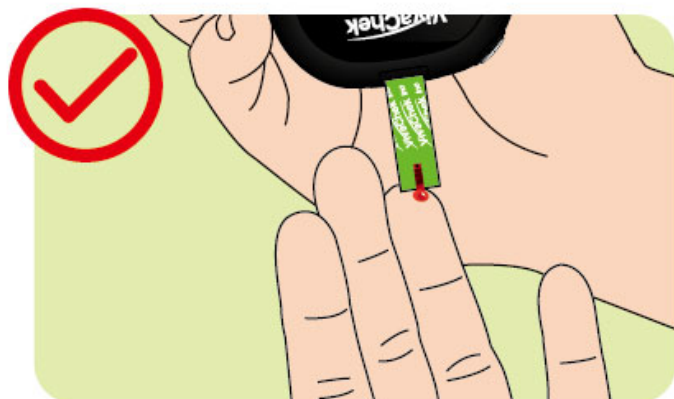


6. Mae'r mesurydd yn cyfri i lawr o 5 i 1 ac yna mae canlyniad eich prawf i'w weld ar y sgrin ac mae'n cael ei storio'n awtomatig yng nghof y mesurydd.



VivaChek Laboratories, Inc.
913 N Market Street, Suite 200,
Wilmington, DE 19801, USA

www.vivachek.com

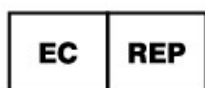

Lotus Medical Equipment Limited
26B Cameron Court, Cork Street,
Dublin 8, Ireland

Distributed in Wales by JRBiomedical Ltd, OpTIC Centre,
Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD.